



Bontempi
Chirurgische Instrumente

Passion for Excellence

TZS | Tedesco Zygomatic System

Developed by **Dr. Andrea Tedesco**

Proudly Produced
Exclusively by

bontempimed.com

Bontempi
Chirurgische Instrumente



Dr. Andrea Tedesco

Lecturer at the II level Master in
Zygomatic Implantology University of Pisa

Le gravi atrofie dei mascellari rappresentano spesso un problema per il clinico in quanto difficili da trattare con impianti tradizionali e altrettanto con tecniche rigenerative. Gli impianti zigomatici in questo contesto rappresentano una valida alternativa alla chirurgia rigenerativa. Con una corretta indicazione clinica e un adeguato training da parte dell'operatore è possibile trattare casi complessi anche a carico immediato per ridurre il disagio del paziente dovuto alle procedure rigenerative. Chiaramente se è vero che in chirurgia, quale essa sia, è di fondamentale importanza avere un campo operatorio ben visibile e isolare strutture anatomiche importanti, abbiamo bisogno di strumenti idonei anche nella chirurgia con impianti zigomatici per visualizzare le zone operatorie specifiche.






Bontempi. Passione italiana, qualità tedesca.

Dal 1974 Bontempi è impegnata nella produzione di strumentario chirurgico di qualità superiore realizzato esclusivamente con i migliori acciai martensitici tedeschi.

Dal 2019 è orgogliosamente partner professionale dello stimato chirurgo di fama internazionale Dott. Andrea Tedesco, nello sviluppo e nella creazione del primo vero set chirurgico dedicato all'Implantologia zigomatica.



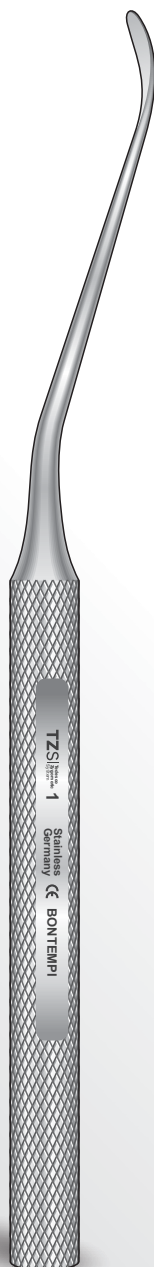


TZS-1

Con il primo strumento si comincia lo scollamento mucoperiosteo sulla parete vestibolare del seno mascellare dirigendosi verso l'area zigomatica.

Durante lo scollamento bisogna fare attenzione a non danneggiare il nervo infraorbitario. L'incisura viene esposta in prossimità dell'orbita fino all' arco zigomatico, distalmente il bordo infero-laterale evitando di danneggiare la bolla del Bichat, lateralmente l' osso zigomatico.

Handle 100 mm x Ø 10,0 mm

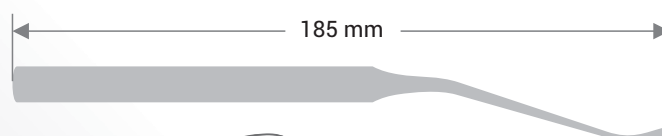

Sharp
8,0 mm



TZS | T-ZS System 2




TZS-2

Il secondo scollatore permette di evidenziare l'area zigomatica. E' di fondamentale importanza un'ottima visibilità in questa zona, punto di arrivo degli strumenti e degli impianti zigomatici.

Per evitare il coinvolgimento dell' orbita durante la sequenza di preparazione, bisogna estendere lo scollamento in direzione postero-superiore verso la superficie laterale dell'osso zigomatico fino al punto d'incisura tra l'arco zigomatico e la superficie mediale e laterale del processo frontale dell' osso zigomatico stesso.

Handle 100 mm x Ø 10,0 mm

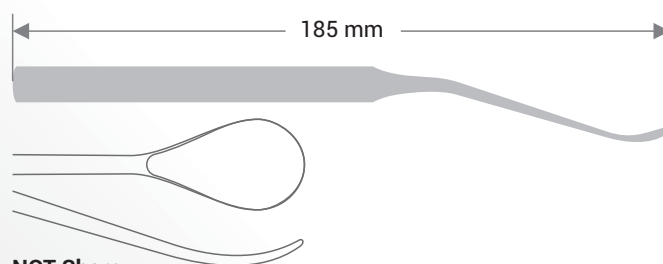


NOT Sharp
12,0 mm



TWS
Tresco
Stomatology
3

Stainless
Germany **CE** **BONTempi**


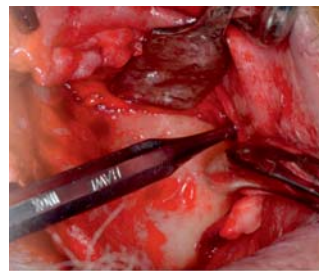


TZS-3

Il terzo strumento è quello che ci permette di oltrepassare l'arcata zigomatica per poi poter apporre il divarcatore specifico.

Proseguire lo scollamento fino ad evidenziare la cresta infrazigomatica.


Handle 100 mm x Ø 10,0 mm

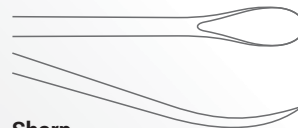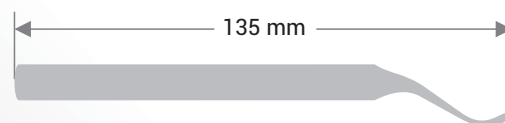

Sharp
5,0 mm



TZS Tedisco
Zygomatic
System **4** Stainless Steel Germany  **BONTEMPI**

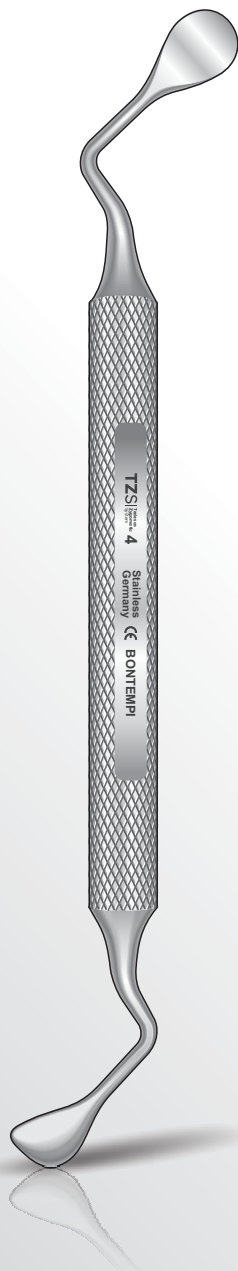


TZS-4

Il quarto scollatore ci permette di rendere visibile l'inizio della fossa infratemporale e dare ulteriore elasticità al lembo eseguito. E' molto importante spostare i tessuti molli in questa zona per non lederli con un accidentale colpo di uno strumento rotante

INFRATEMPORAL FOSSA

Si procede allo scollamento della parete posteriore del seno allentando la tensione dei lembi. Inoltre, si separano i tessuti molli dal piano osseo per evitare di lacerarli nel caso in cui inavvertitamente uno strumento perfori la corticale esterna.

Handle 90 mm x Ø 10,0 mm

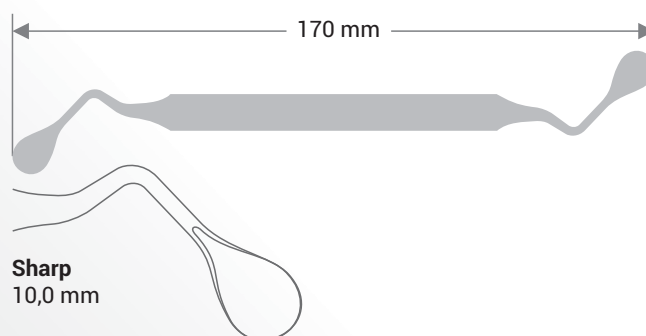




TZS 5 Stainless Steel BONTempi

Stainless Steel BONTempi
Germany

TZS 5

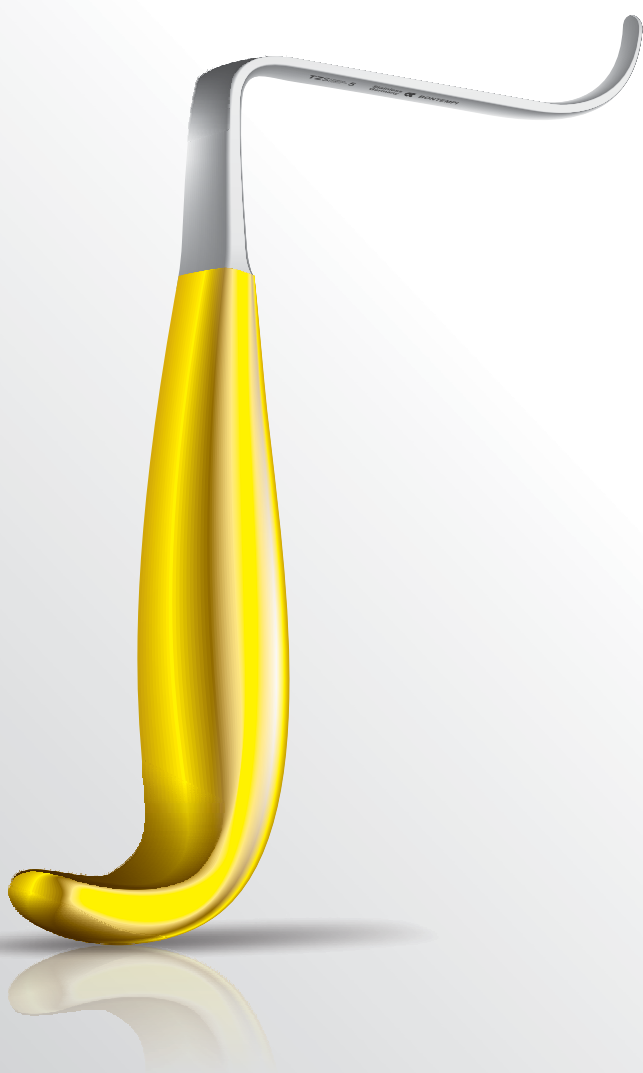


TZS-5

Infine il divaricatore specifico per questa tecnica ci permette di evidenziare ulteriormente tutta l'area zigomatica interessata e proteggere i tessuti molli adiacenti da eventuali manovre improprie soprattutto con la strumentazione rotante

Nel posizionare delicatamente il divaricatore non si deve eccedere nella trazione. Il solo incastro permette una buona visualizzazione.



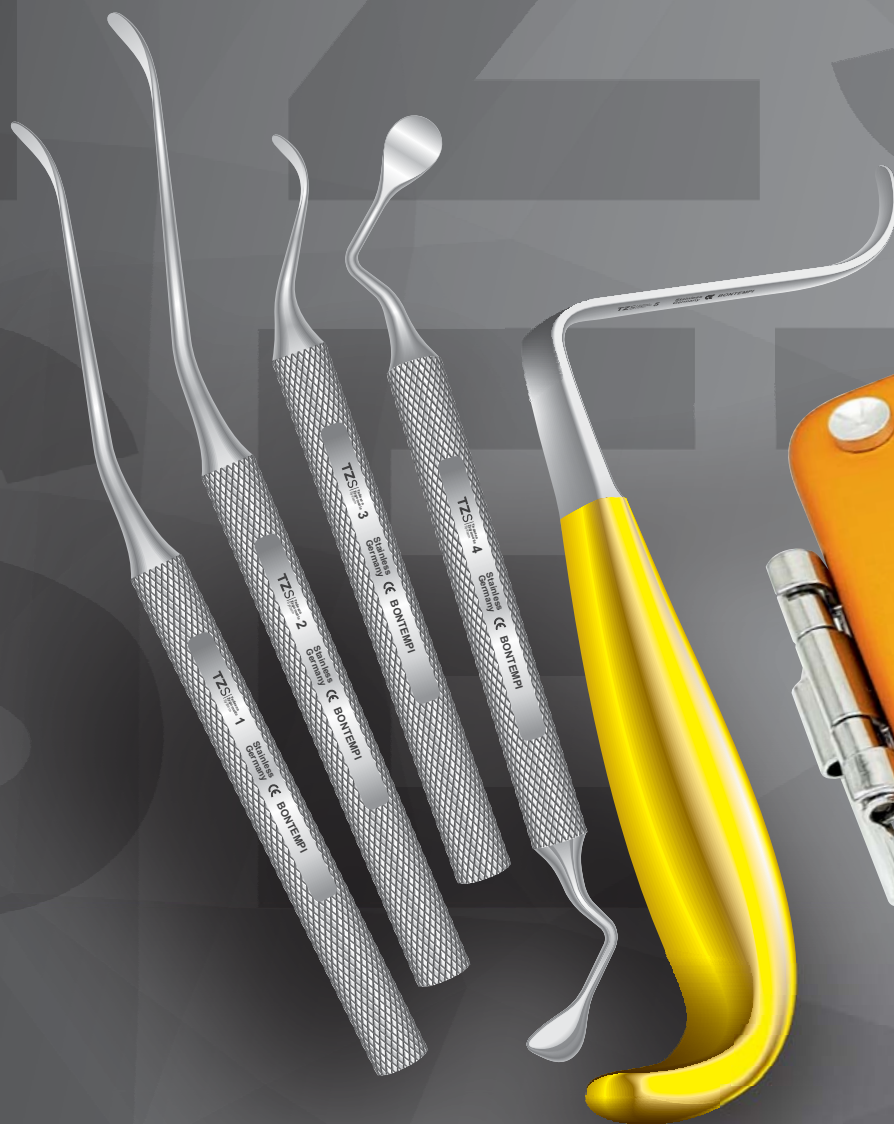



TZS-SET

Composizione del Set **Tedesco Zygomatic System**

Codice	Descrizione	Price
TZS-1	Scollatore tagliente 0,8 mm	195,90 €
TZS-2	Scollatore non tagliente 12,0 mm	195,90 €
TZS-3	Scollatore tagliente a stelo corto 5,0 mm	195,90 €
TZS-4	Scollatore tagliente doppio 10,0 mm	257,50 €
TZS-5	Divaricatore zigomatico 7,0 mm	397,00 €
TZS-C	Container Giallo 300x140x70 mm	289,50 €
TZS-T	Tappeto in aghi di silicone 260x120 mm	92,80 €
TZS-F	Filtro permanente PTFE 1200 cicli	61,20 €
TZS-SET	Tedesco Zygomatic System Set completo	1.685,70 €

Bontempi
Chirurgische Instrumente



Dr. Andrea Tedesco

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l' Università degli Studi di Firenze ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica presso il Reparto di Chirurgia Maxillo-facciale del C.T.O. di Firenze

Ha inoltre conseguito un corso di Specializzazione presso il Dipartimento di Chirurgia Maxillo-Facciale del Saint Thomas Hospital di Londra interessandosi prevalentemente di implantologia zgomatica

Relatore di corsi e congressi di formazione e perfezionamento sull'implantologia zgomatica sia in Italia che all'estero è Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali

Member Fellow of Royal Society of London, è attualmente iscritto al GDC di Londra dove vi esercita come consulente per l'implantologia zgomatica

Nel 2016 è stato premiato per la miglior Oral Communication alla Royal Society of London su: "Advances in Maxillofacial Surgery: The

treatment of atrophic maxilla using zygomatic implants: a new Minimally Invasive Technique with piezoelectric instrumentation " presentando una nuova tecnica zgomatica da lui ideata

Member of Zygomatic Implantology Committee, Zygomatic2019 Congress di Londra nel 2019

Premio " Best Dentist Zygomatic Implantologist " al World Dental and Oral Health Congress, House of Parliament di Londra nel 2019

Premio " The King of Zygomatic Implantology " al World Dental and Oral Health Congress Chennai, India 2019

Honorary Professor presso l' Università di New Dehli per l'Innovazioni in chirurgia implantare zgomatica 2019

Autore del libro: " Gli impianti zgomatici: attualità nelle riabilitazioni implanto-protesiche dei mascellari atrofici " Ed. Quintessenza

Fellow Research presso l'U.O. di Chirurgia Orale diretta dal Prof. M. Gabriele dell'Ospedale S. Chiara di Pisa sul trattamento chirurgico delle gravi atrofie dei mascellari con l'utilizzo di impianti zgomatici

Titolare di studio odontoiatrico privato in Firenze, esercita la libera professione occupandosi essenzialmente di chirurgia orale ed implantologia

Docente/Tutor in Implantologia al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, al Master in Chirurgia d'urgenza, al Corso di Specializzazione in Chirurgia Orale e al Master di II livello in " Implantologia Zgomatica « presso il Dipartimento di Odontoiatria diretto dal Prof. M. Gabriele dell' Università di Pisa

TZS | Tedesco
Zygomatic
System

Proudly Produced Exclusively by



Passion for Excellence

BONTEMPI
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

BMED Srl - Via Mincio, 166
47842 San Giovanni in Marignano RN
C.F. e P.Iva 04006860409

T +39 0541 1799990
F +39 0541 1794330

bontempimed.com
info@bontempimed.com